

Sicherheits-Klingentferner | Security Blade Remover



ZEPF REF 46.005.65

Sehr geehrter Kunde!


Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt aus unserem Hause entschieden – vielen Dank.

Damit Sie auch auf Dauer Freude haben, erlauben wir uns, Ihnen nachstehend die Anwendung dieses Instruments zu erklären:


Dear Customer!

We thank you very much for having chosen this high quality product from Helmut Zepf.


To get the best from your instrument, please follow the instructions below:

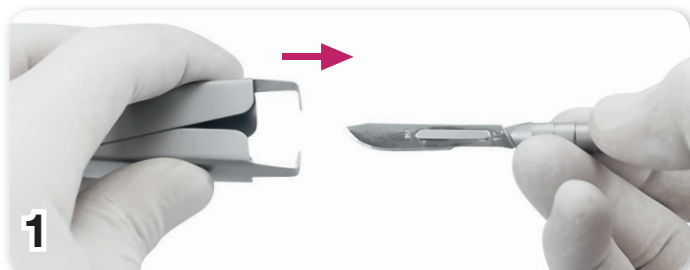


- Skalpellgriff in Klingentferner einführen. Auf richtige Stellung achten. Klingensblock und **ZEPF** Logo auf dem Klingentferner müssen nach oben zeigen.
- Introduce scalpel handle into blade remover. Make sure that scalpel handle and blade remover are in correct position. **ZEPF** logo on blade remover and blade holder on scalpel handle showing upwards.

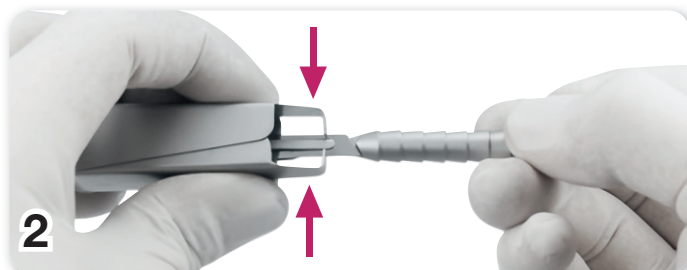

- Schenkel des Klingentferners zusammendrücken.
- Close jaws of blade remover by pressing from both sides.

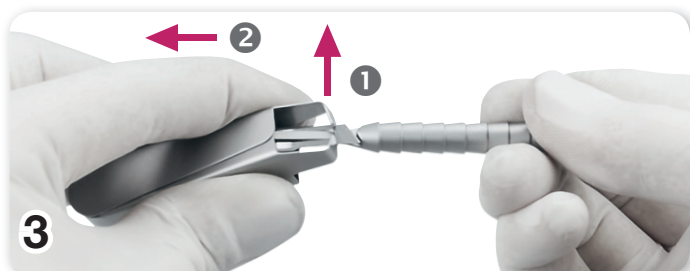

- Skalpellschneide über die Arretierung des Skalpellsgriffs heben (Richtung ①) und Klinge nach vorne abziehen in Richtung ②.
- Lift the end of the scalpel blade above the lock of the scalpel handle (direction ①) and remove the blade by pulling it forward in direction ②.

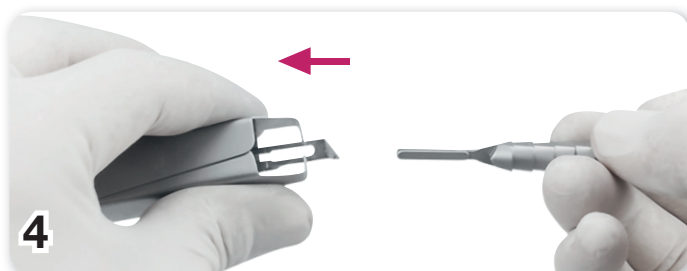

- Nach erfolgter Klingentnahme.
- After removal of scalpel blade.



- Entleeren des Klingentferners.
- Disposal of scalpel blade.



46.005.65

Empfohlene Skalpellsgriffe / Recommended Scalpel Handles



46.007.00 Skalpellsgriff **ZEPF**-Line, gerade, für Klappen # 10 -15, 14,5 cm

Scalpel Handle **ZEPF**-Line, straight, for blades # 10 -15, 14.5 cm



46.007.01 Skalpellsgriff, **ZEPF**-Line, abgewinkelt, für Klappen # 10 -15, 14,5 cm

Scalpel Handle, **ZEPF**-Line, angled, for blades # 10 -15, 14.5 cm

