


Close to you.

MANUFACTURER SINCE 1921

ZEPF Ringstanzen Set zur Gewinnung von Schleimhauttransplantaten

nach Dr. Marco Zeltner CH

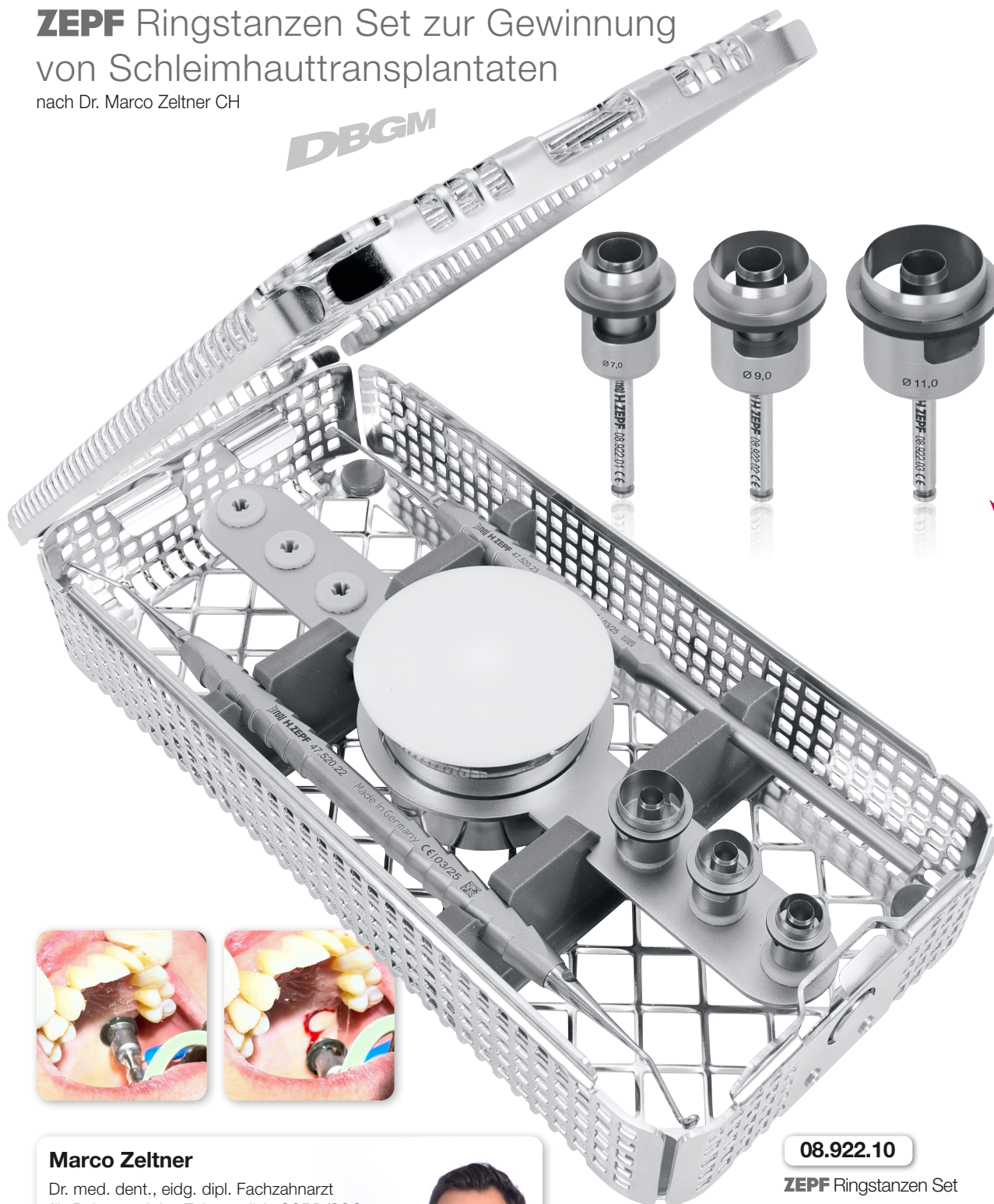

Marco Zeltner

Dr. med. dent., eid. dipl. Fachzahnarzt
für Rekonstruktive Zahnmedizin SSRD/SSO

2006: Staatsexamen an der Universität Zürich

2006: Zahnarzt bei Grimm Zahnärzte

2012 - 2015: Spezialisierung für Rekonstruktive Zahnmedizin auf der Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztlicher Materialkunde der Universität Zürich

2017: Partner der Praxis Grimm Zahnärzte



08.922.10

ZEPF Ringstanzen Set

ZEPF | dental
newsticker

ZEPF Ringstanzen Set zur Gewinnung von Schleimhauttransplantaten

nach Dr. Marco Zeltner CH (DBGM)

Als Folge einer Zahnextraktion kommt es zu einem Remodellierungsprozess der umliegenden Gewebe – nicht nur auf Knochenebene, sondern auch im Weichgewebe. Soll der fehlende Zahn bzw. die fehlenden Zähne durch eine implantatgetragene Rekonstruktion/en ersetzt werden, ist in vielen Fällen eine Gewebeaugmentation erforderlich.

Um optimale ästhetische Ergebnisse zu erzielen und eine biologische Situation zu schaffen, die die langfristige Stabilität der eingesetzten Rekonstruktion gewährleistet, sollte nicht nur der Knochen aufgebaut, sondern auch das Weichgewebe verdickt werden.

Das Transplantat wird aus dem harten Gaumen entnommen und in das Empfängergebiet transplantiert, wo es zur Schaffung einer stabilen Gewebesituation beiträgt. Ein dickes, befestigtes und keratinisiertes Weichgewebe besitzt protektive Eigenschaften, die das Implantat vor Knochenverlust schützen.

Zepf Ringstanzen-Set

Dieses Set ermöglicht die einfache Entnahme definierter Schleimhautringe, die aus dem Gaumen gewonnen werden. Dazu wird das Epithel an der Spenderstelle mit einem groben Diamanten entfernt, bevor der Schleimhautring mithilfe der Ringstanze entnommen und anschließend über das Implantat gestülpt wird. Ein integrierter Tiefenstopp verhindert zuverlässig eine zu tiefe Präparation und trägt zu einer schmerzarmen Heilung bei.

Die Zepf Ringstanzen mit einem definierten Tiefenstopp von 3 mm verfügen über Innendurchmesser von 4 mm und sind in den Außendurchmessern von 7 mm / 9 mm und 11 mm erhältlich. Das finale Auslösen der Transplantate aus der Spenderregion wird mit den zwei im Set enthaltenen Ringmessern einfach ermöglicht.

Das Set findet Aufnahme in einem Waschkorb und kann so zuverlässig dem Wiederaufbereitungsprozess zugeführt werden, womit es eine optimale Aufbereitung nach RKI-Kriterien erfüllt.

Diese Technik hat sich als effektiv erwiesen, um die Schleimhaut um ein Implantat zu verdicken und die periimplantären Verhältnisse zu optimieren.

Inhalt: ZEPF Ringstanzen Set nach Dr. Marco Zeltner CH

Ringstanzen mit Tiefen-Stop 3 mm und Innenring-Ø 4 mm



08.922.01

Ringstanze mit
Außenring-Ø 7 mm



08.922.02

Ringstanze mit
Außenring-Ø 9 mm



08.922.03

Ringstanze mit
Außenring-Ø 11 mm



85.251.04

Anmischbecher, rostfrei,
mit Deckel aus POM, Ø 4 cm



47.520.22 Ringmesser Ø 3 mm, 30° gewinkelt, doppelendig



47.520.23 Ringmesser Ø 3 mm