


# Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**



## CompoSMOOTH Composite Set

THE SURFACE IS THE KEY...

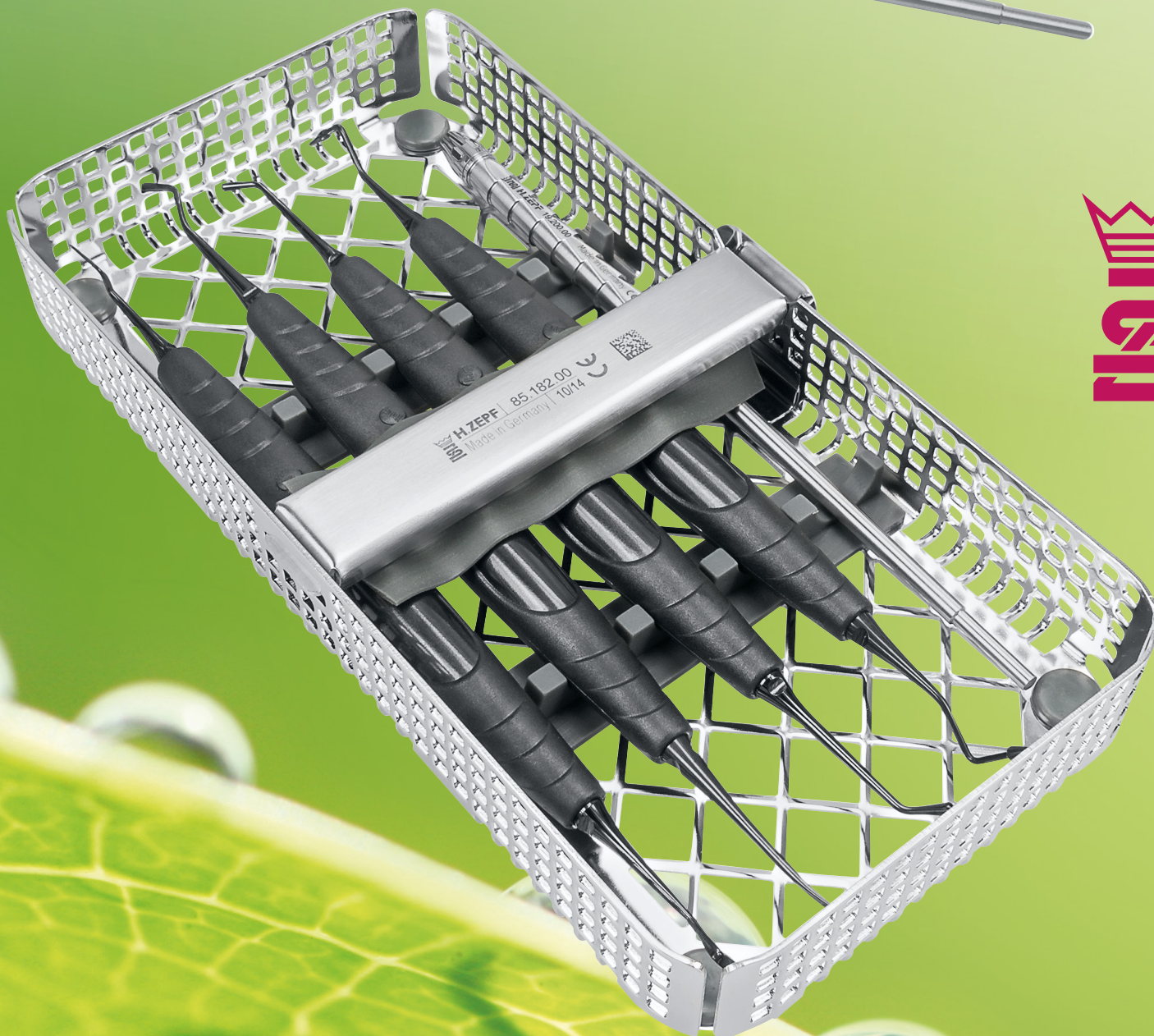

**ZEPP** | dental  
newsticker

# CompoSMOOTH

THE SURFACE IS THE KEY...

Der natürliche Zahn als Vorbild für jede ästhetische Restauration setzt hohe Anforderungen an das verwendete Material, an den Zahntechniker sowie an den Zahnarzt. Im Falle direkter Kompositrestaurationen liegt die gesamte ästhetische Verantwortung in den Händen des Behandlers.



19.201.11



19.201.21



19.201.31




**Soft Applikationseinsätze für Schichttechnik**

zur Aufnahme  
in Griff **19.200.00**  
VPE 12 Stück

19.202.00

**CompoSMOOTH Komplettsset** in der Box inkl.  
Waschrähmen 1/3, mit Pinselhalter, 3 x 12 Soft  
Applikationseinsätze und 4 Composite Instrumente

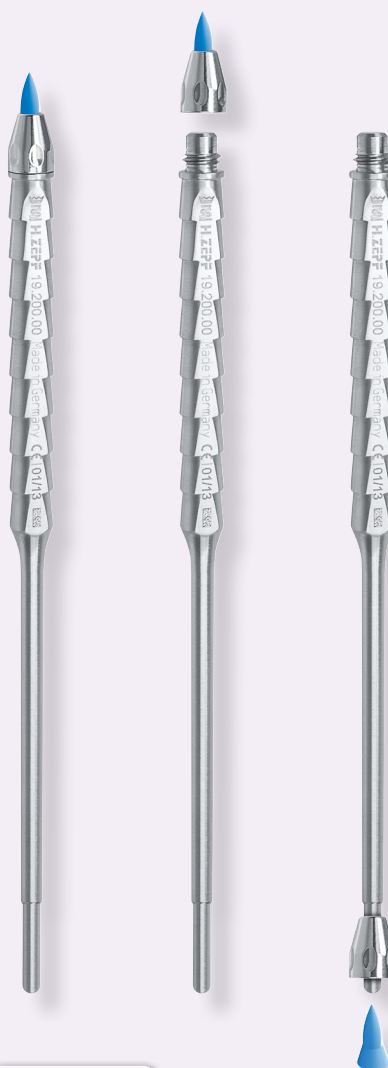

19.200.00

Pinselhalter **ZEPF**-Line mit Ausstoßfunktion



Ein optimales Instrumentarium ist der Schlüssel zum Erfolg. Das neue **CompoSMOOTH**, ein spezieller Silikonpinsel, ermöglicht eine mühelose Bearbeitung der Kompositoberfläche vor der Polymerisation. Auch „klebrige“ Komposite können optimal adaptiert werden. Durch leichten Druck entsteht das perfekte – am Nachbarzahn angepasste – Oberflächenrelief wie von selbst. Die anschließende Politurzeit ist verkürzt, der Verbrauch an Polierern reduziert... und das Ergebnis – optimal!



Pinselhalter 30°  
optional erhältlich

Um auch an schwierig erreichbaren Stellen ein optimales Ergebnis erzielen zu können, hat **HELMUT ZEPF** diesen um 30° gebogenen Pinselhalter entwickelt. Dieser ist nicht im Set enthalten und kann optional das Set gewinnbringend ergänzen.



19.200.30

Pinselhalter  
30° gebogen **ZEPF**-Line  
mit Ausstoßfunktion



## Abbildung



## Artikelbeschreibung

19.202.00

**CompoSMOOTH Komplettsset**

nach Prof. Dr. Gabriel Krastl  
inkl. Waschrahmen 1/3 und  
Soft Applikationseinsätzen in der Box

## Bestellmenge

1 Set

**CompoSMOOTH**  
THE SURFACE IS THE KEY...

bestehend aus:

26.120.10Ti

# 1, Spatel 1,5 mm, klein

1 Stück

26.120.12Ti

Spatel 1,8 mm / Biberschwanz-Einsatz 2,6 mm

1 Stück

26.120.25Ti

Stopfer Ø 1,5 mm / Stopfer Ø 1,9 mm (Birnenform)

1 Stück

26.120.32Ti

Fissurenformer Ø 1,9 mm / Ø 2,3 mm

1 Stück

19.200.00

Pinselhalter **ZEPF**-Line mit Ausstoßfunktion

1 Stück

19.201.11

zur Aufnahme in Pinselhalter

Soft Applikationseinsätze für Schichttechnik

12 Stück

19.201.21

zur Aufnahme in Pinselhalter

Soft Applikationseinsätze für Schichttechnik

12 Stück

19.201.31

zur Aufnahme in Pinselhalter

Soft Applikationseinsätze für Schichttechnik

12 Stück

**Curriculum Vitae: Prof. Dr. Gabriel Krastl**

Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie  
Universitätsklinikum Würzburg

- **1993 - 1998** Studium der Zahnheilkunde in Tübingen (D)
- **1998 - 2005** Wissenschaftlicher Assistent, ab 2002 Oberarzt an der Poliklinik für Zahnerhaltung, Universitätsklinikum Tübingen
- **2005 - 2014** Oberarzt an der Klinik für Parodontologie, Endodontologie und Kariologie, Basel (CH); Leiter Fachgruppe Kariologie
- **2006 - 2014** Gründung und Leitung des Zahnunfall-Zentrums Basel zusammen mit Prof. Dr. A. Filippi
- **Seit 2014** Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Universitätsklinikum Würzburg