

Close to you.

MANUFACTURER SINCE 1921

ZAHNERSATZHEBER

NACH DR. WIETZORKE

SCHNELL, SICHER, SCHONEND

Bieten Sie Ihren Patienten einen echten Mehrwert. Gerade bei neuen Teleskopprothesen, mit mehreren Teleskopen, ist es für den Patienten meist recht schwierig, die passgenau sitzende Prothese zum Reinigen zu entfernen.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine Teleskopprothese nur durch ein gleichmäßiges Lösen aller Teleskopkronen entnommen werden kann.

Ein einseitiges Herauskippen würde zum Verkanten führen. **HELMUT ZEPF** Medizintechnik GmbH hat in Zusammenarbeit mit Dr. Wietzorke hierfür den Zahnersatzheber entwickelt.



Vorteile des Zahnersatzhebers

- Sicheres und schnelles Abnehmen der Teleskopprothese Ihrer Patienten.
- Vermeidung von Reklamationen, die durch falsche Hilfsmittel hervorgerufen werden.
- Sicherung der Investition Ihrer Patienten.

Resultat

Zufriedener Patient = zufriedener Behandler

Anwendung des Zahnersatzhebers



1. Ansetzen des Hebers.
Der Griff zeigt in Zugrichtung.



2. Einführen des Hebers.
Die Instrumentenspitze zwischen die Krone schieben, das abgerundete Ende schützt die Lippe vor Verletzungen.



3. Erste Hehebewegungen lösen die Verbindung der Teleskop-Außenkrone und Teleskop-Innenkrone.



4. Wechseln der Seite.



5. Wieder Wechseln und Heben.
Durch mehrfaches Wiederholen dieses Vorgangs wird die Teleskopprothese leicht und gleichmäßig herausgelockert, ohne zu verkanten.



BIONIK



reddot design award
winner 2010

ZEPF dental
newsticker

Abbildung



Artikelbeschreibung **ZAHNERSATZHEBER**
NACH DR. WIETZORKE

Bestellmenge

19.265.00

1 Set

Thekendisplay inkl. 20 Zahnersatzheber
nach Dr. Wietzorke, in **ZEPF bionik** Griffen



Zahnersatzheber im **ZEPF bionik** Griff
sind in folgenden Farben erhältlich



19.265.01

gelb

1 Stück



19.265.02

signalorange

1 Stück



19.265.03

rotviolett

1 Stück



19.265.04

signalviolett

1 Stück



19.265.05

hellrot-magenta

1 Stück



19.265.06

türkis-lichtblau

1 Stück



19.265.07

kobaltblau

1 Stück



19.265.08

gelbgrün

1 Stück



19.265.09

grau

1 Stück



19.265.10

schwarz

1 Stück

