

# Close to you.


MANUFACTURER SINCE 1921

**ZEPF** Augmentat-Applikator



**ZEPF** | *dental*  
newsticker

## ZEPF Augmentat-Applikator

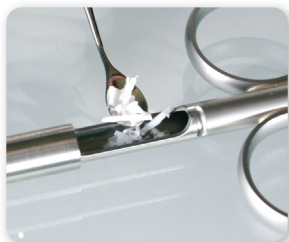

Der Augmentat-Applikator unterstützt die fraktionierte Verfüllung des Subantralraumes mit partikulärem Augmentat. Die Verdichtung des Augmentates erfolgt mit Hilfe eines Sinusstoppers.

Das Instrument mit dem Durchmesser Ø 5 mm wird hierzu von der Seite geladen.

Über den Spritzenmechanismus kann das Augmentat dann dosiert und punktgenau appliziert werden (siehe Anwendungsbilder).



Das Instrument ist zerlegbar und gewährleistet eine optimale Reinigung.



**19.714.16**

**ZEPF** Augmentat-Applikator, Ø 5 mm, gerade, mit seitlichem Einfüllfenster für Augmentat



**41.868.07**

**Kirsch**, Sinus 7, Stopfer Ø 5 mm, Löffel 8 x 10 mm, Titan-Griff **ZEPF**-Line, doppelendig, 17,5 cm

