

SRC Kit für die subperiostale Rezessionsdeckung
nach Dr. Zeltner, mit SRC Instrumenten im Z-SHAPE-Griff und ZEPF nanoPal®-Beschichtung



100%

SRC

Z-SHAPE DBGM
RELAX

Anwendung: SRC Instrumente für die subperiostale Rezessionsdeckung
nach Dr. Zeltner




Bild 1: Klinische Ausgangslage mit generalisierten Rezessionen im Unterkiefer links



Schritt 1: Inzision in der Eckzahnregion 3 - 4 mm unterhalb der Mukogingivalgrenze.





Schritt 2: Horizontale subperiostale Präparation des ganzen Quadranten mit Instrument #1.

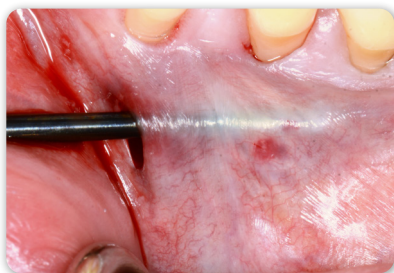


Schritt 2: Achtung: Der Nervus mentalis muss geschont werden!



Schritt 3: Zusätzliche Inzision im Bereich des ersten Molaren 3 bis 4 mm unterhalb der Mukogingivalgrenze.

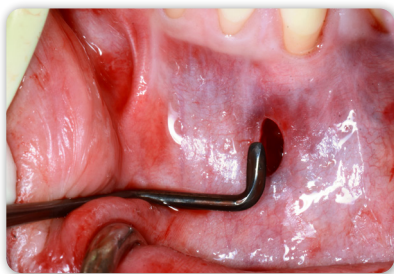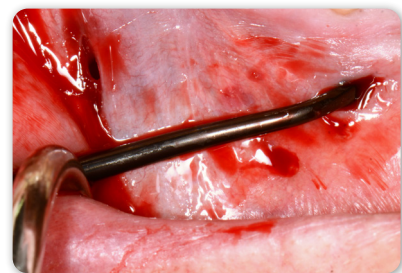

Schritt 4: Vertikale subperiostale Präparation von mesial nach distal bis zum Margo Gingivae mit dem geraden Arbeitsteil des abgewinkelten Instrumentes #4.

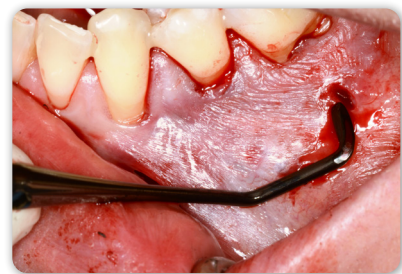


Schritt 5: Anheben der Papillen von mesial nach distal mit dem gekrümmten Ende des Instrumentes #4.



Schritt 6: Wiederholung von Schritt 4 und 5 von distal nach mesial mit gegenläufigem Instrument #3.



Schritt 6: Wiederholung von Schritt 4 und 5 von distal nach mesial mit gegenläufigem Instrument #3.

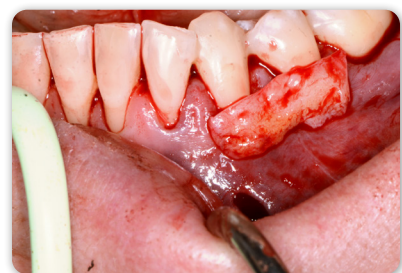


Schritt 7: Einbringen von autologem Bindegewebe oder Weichgewebe-Ersatzmaterialien.



Anwendung: SRC Instrumente

nach Dr. Zeltner

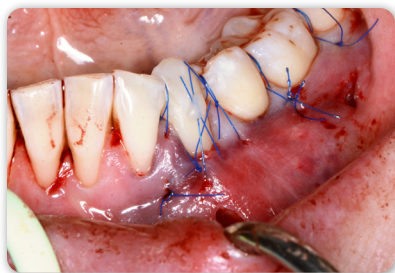

Schritt 8: Fixation des Lappens in koronaler Position mit vertikalen Umschlingungsnähen.

Marco Zeltner

Dr. med. dent., eidg. dipl. Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnmedizin SSRD/SSO

2006: Staatsexamen an der Universität Zürich

2006: Zahnarzt bei Grimm Zahnärzte


2012 - 2015: Spezialisierung für Rekonstruktive Zahnmedizin auf der Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztlicher Materialkunde der Universität Zürich

2017: Partner der Praxis Grimm Zahnärzte



Inhalt: SRC Kit

nach Dr. Zeltner

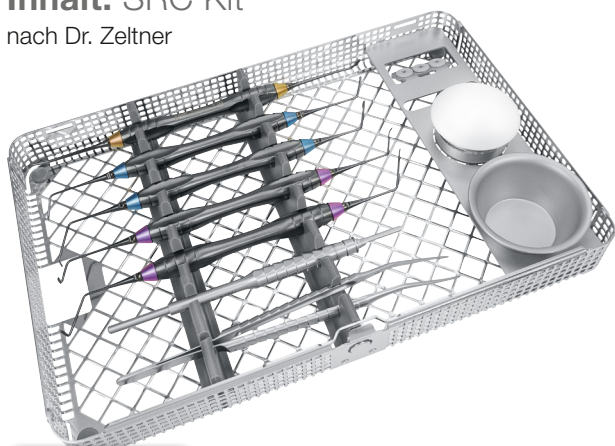

46.045.000X

SRC Kit im 1/1 Waschkorb beinhaltet folgende Instrumente: SRC Instrumente #1 bis #5, Drop-Control Klingenthaler, Cooley Mikro-Pinzette, Anmischbecher mit Deckel und Medizinbecher




85.252.25

Medizinbecher, rostfrei, Ø 60 mm x 27 mm hoch, 25 ccm



85.251.04

Anmischbecher, rostfrei, mit Deckel aus POM, Ø 40 mm x 30 mm hoch, beidseitig verwendbar

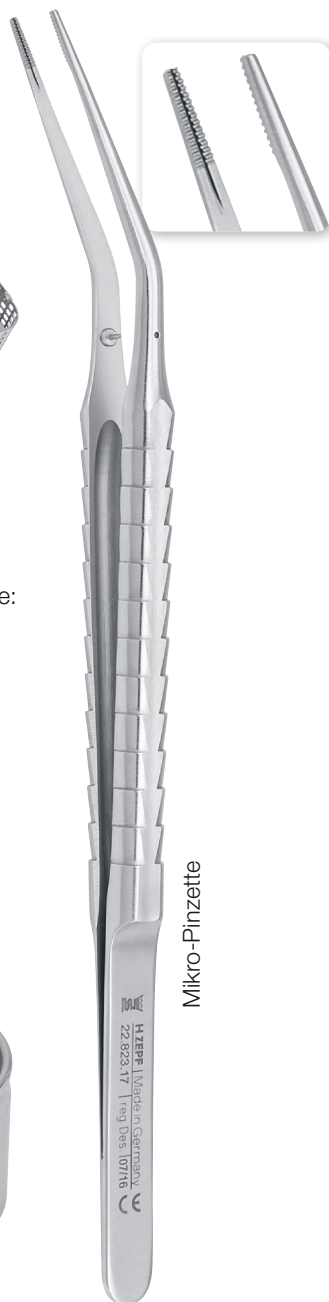

Mikro-Pinzette

22.823.17

Cooley
25° gebogen




Skalpellklingenthaler

46.007.18

Drop-Control®
Ø 9,5 mm



Inhalt: SRC Kit für die subperiostale Rezessionsdeckung
nach Dr. Zeltner

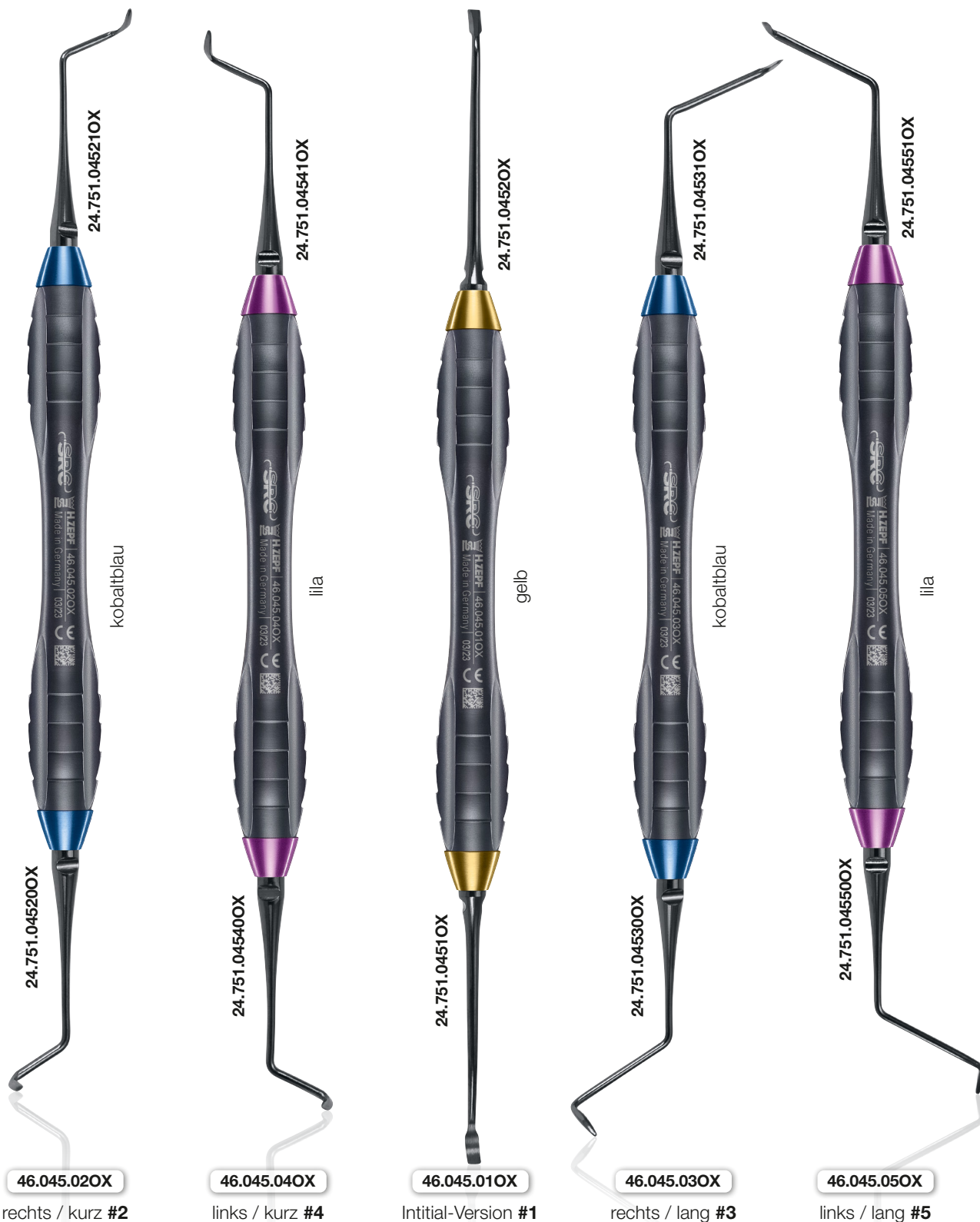

▶ SRC Instrumente im Z-SHAPE-Griff mit ZEPF nanopal®-Beschichtung ◀

AESTHETIC IS THE RESULT



HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH · FABRIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
Obere Hauptstraße 16-22 · 78606 Seitingen-Oberflacht, Germany
Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 88 -0 · Fax: +49 (0) 74 64 / 98 88 -88 · zepf-dental.com

